

BABYCHECK-1 WB Test ciążowy z krwi

cena: 19,87 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Lab. Home Poland
Wysyłka	do 24 godzin

Opis produktu

Różnice między testem ciążowym wykonanym z moczu, a tym z krwi:

W trakcie ciąży hormon hCG w pierwszej kolejności uwalnia się do krwiobiegu, a dopiero później do moczu !

Testy ciążowe z moczu należy wykonać z pierwszej, porannej próbki moczu – kiedy stężenie hCG jest największe. W przypadku wczesnej ciąży, wykonanie testu z moczu o innej porze dnia może wskazać wynik fałszywie negatywny, co w przypadku testu ciążowego z krwi nie występuje.

Przyjmowanie dużej ilości płynów może wpłynąć na wynik testu ciążowego z moczu (rozcieńczenie hCG). Natomiast nie ma wpływu na badanie hCG w krwi.

Większa dokładność testów ciążowych z krwi powoduje, że mają zastosowanie w laboratoriach medycznych oraz szpitalach. Test BABYCHECK-1 WB jest stosowany we wszystkich szpitalach we Francji.

Test ciążowy z krwi BABYCHECK-1 WB służy do szybkiego wykrywania ciąży – **już po kilku dniach od zapłodnienia**.

Zestaw zawiera:

- * Płytkę testową,
- * Pipetkę,
- * Lancet,
- * Diluent

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób należy wykonać test:

1. Ważne, aby przed jego wykonaniem zapoznać się z instrukcją.
2. Wynik testu jest prawidłowy tylko wtedy, gdy instrukcja jest ściśle przestrzegana.
3. Rozewnij torebkę wzdłuż krawędzi, wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę.
4. Przekręć szarą nakrętkę aż poczujesz, że oddzieliła się od nakłuwacza.
5. Kontynuuj przekręcanie (2-3 obroty, po czym zdejmij i wyrzuć nakrętkę).

6. Zdezynfekuj opuszki wybranego palca dłoni.

- aby zwiększyć ukrwienie - pomasuj dokładnie palec.

7. Docisnij mocno nakłuwacz do bocznej strony opuszka palca i naciśnij przycisk wysuwający lancet.

8. Przyłóż końcówkę pipety do kropli krwi w pozycji równoległej.

9. Na pipecie znajduje się linia, która sygnalizuje ile krwi należy pobrać.

10. Przenieś całą pobraną krew do dołka próbkowego.

11. Poczekaj 20-30 sekund, aż cała krew znajdzie się w dołku próbkowym.

12. Odkręć niebieską nakrętkę, biała zakrętka zostaje przykręcona.

13. Dodaj 4 krople Diluentu do dołka próbkowego w przerwach 2-3 sekundy, pomiędzy każdą kroplą.

14. Odczekaj 5 minut, po tym czasie możesz odczytać wynik.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

